

Hinweise zur Mund-Nasen-Maske

Bitte beachte:

Das Tragen unserer Masken bietet keinen nachgewiesenen Schutz vor Corona. Diese Maske ist weder geprüft noch zertifiziert.

Trotz Maske gilt:

halte Abstand - wasche deine Hände regelmäßig – fasse dir nicht ins Gesicht

#stayhome

#flattenthecurve

Umgang mit der Maske

Aufsetzen einer Maske:

1. Wasche deine Hände mindestens 30 Sekunden gründlich.
2. Ziehe die Maske auseinander und
3. lege die Bänder beidseitig über die Ohren.
4. Nun drückst du mit jeweils zwei Fingern, gleichzeitig die Maske fest an deine Nase, so dass sich der Draht an deine Gesichtsform anpasst.
5. Fasse die Maske nun nicht mehr an.

Abnehmen einer Maske:

1. Wasche deine Hände mindestens 30 Sekunden gründlich.
2. Fasse die Maske nur an den Bändern an und nimm sie von den Ohren.
3. Wasche deine Hände mindestens 30 Sekunden gründlich.
4. Die Maske sollte am selben Tag bei mind. 60 Grad gewaschen oder 5 Minuten ausgekocht werden.
5. Die Maske vor der nächsten Nutzung gut trocknen lassen.

Unsere Mund-Nasen-Masken in weiß, schwarz und „Stars – rot“ sind bei 95 Grad waschbar. Die äußere Stoffseite besteht aus 100 % Baumwolle. Der innere Stoff besteht aus einem antimikrobiellen Stoff (93 % Trevira Bioactive / 7 % Elasthan).

Unsere bunten Mund-Nasen-Masken sind bei 60 Grad waschbar. Die äußere, bunte Stoffseite besteht aus 100 % Baumwolle. Der innere Stoff besteht aus einem antimikrobiellen Stoff (93 % Trevira Bioactive / 7 % Elasthan).